

リクライニング車椅子アポロン取扱説明書

フットレストの高さ調整 下げる場合



フットレストを下げる場合は、片手でレバーを持ち上げた状態を維持し、もう片方の手でフットレストを下げます。下がりにくい場合はフットレストを上下に動かしながらレバーを持ち上げると動きます。

下記URLに調整動画がございます。
https://youtu.be/rnbW4hsj_4g

フットレストの高さ調整 上げる場合



フットレストを上げる際はレバーを触らずにフットレストだけで持ち上がります。※定期的な注油を行うことでよりスムーズな動きになります。

下記URLに調整動画がございます。
<https://youtu.be/hfKtL2YCNk>

転倒防止キャスターの高さ調整



丸部分の金具を手前に引くことにより、転倒防止キャスターの高さ調整が出来ます。※乗車前にフロント部を持ち上げ転倒防止装置が地面に設置し、車椅子が後方転倒しないことを必ず確認してください。

下記URLに調整動画がございます。
<https://youtu.be/ndTmHv-vW2Q>

背もたれの角度調整



ハンドルレバーを握ることにより、背もたれ部分の角度調整が可能となります。※左右並行になるように調整をしてご使用下さい。

下記URLに調整動画がございます。
<https://youtu.be/T5EObrwhq60>

補強バーの取付方法



矢印部分を時計回りに動かすと締まります。また反時計回りに動かすと緩みます。※ご使用時は安全の為、必ず補強バーをお取り付けください。※折り畳みの際は補強バーを外してください。

下記URLに調整動画がございます。
https://youtu.be/arWH0U_KVeU

レッグクッションの取付



フットレスト部分に備え付けのクッションをマジックテープにて取り付ける事が可能です。

※必ずお読みになってください

- 転倒防止キャスターをティッピングレバーとして使用しないでください。(転倒防止バーを足で踏まないでください。)
- 転倒防止バーを持って車いすを持ち上げないでください。
- 使用前には、転倒防止装置が左右とも確実に固定されていて、抜けたり回ったりしないことを確認してください。
- 使用前には、クランプパーツが正しい位置にしっかりと固定されていて、動かないことを確認してください。
- 転倒防止バーがクランプパーツの先端のピンでしっかりと固定されて、はずれないことを確認してください。
- 転倒防止装置を使用の際は、かならず左右両方に転倒防止装置を設置してください。片側だけを設置して使用しないでください。
- 製品に異常がある場合は使用を中止してください。
- リクライニング動作は、必ず駐車ブレーキをかけた状態で行ってください。
- リクライニングする時は必ず両方のレバーを握り、左右均等に力を加えて下さい。誤った操作をすると、バランスを崩して転倒したり、左右のフレームが歪んだりする恐れがあります。
- ご使用になる際は必ず補強バーを取り付けてご使用ください。
- 補強バーを取り付けずにご使用されると、フレームの歪みや破損に繋がる恐れがあります。
- 1台1台ハンドメイドによる組付けの為、左右非対称の場合がございます。
- 部位によりサイズの差異がある場合がございます。
- 可動部分は必ず定期的に注油やネジの増し締めなどのメンテナンスを行ってください。
- 塗装の剥げや色あせがある場合がございますが使用に問題が無い場合はクレームの対象外とさせていただきます。
- 各部の調整・調節を行うときは、必ず駐車ブレーキをかけた状態で行ってください。