



<http://www.youtube.com/user/kadokurawheelchair>

メンテナンス方法・上映中！

簡易型介助車椅子 タイプ1


Next ネクスト



1. 箱から出します




2. 本体を広げた後フットレストを出します。

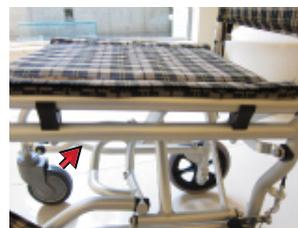

3. シートがフレーム部分にしっかりと固定されているか確認してください。



4. ハンドル部分を持ち上げ背折れレバーが固定されているか確認してください。

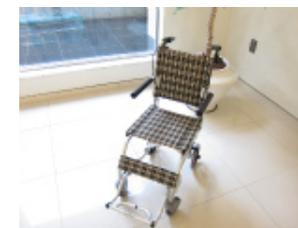

5. アームレストとフットレストを出し完成となります。

簡易型介助車椅子 タイプ2

Touch タッチ



1. 箱から出します



2. ハンドル部分を持ち上げL字金具をずらしバックレストが倒れないように固定する。



3. ^{*}固定ピンは解除ベルトを中央部分から左右均等に引くことにより折畳むことが可能になります。



4. アームレストとフットレストを出し完成となります。

<折り畳み方法>



※中央のバーを押し下げることによりシート部分を折り畳むことが可能になります。