



ガドクラ マンガ 道場

車椅子に関する不安や疑問は
マンガを読んで解決！




保証はどうなってるの？



1

買った車椅子がもし壊れたら
どうなるのかな？

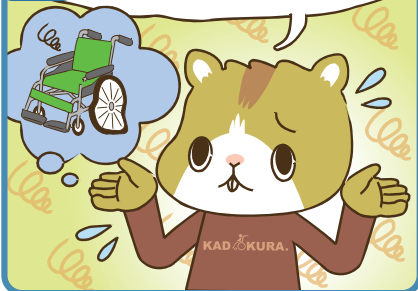

2

なにか保証とか
あるの？



3

大丈夫！1年間のメーカー
保証が付いているわ！



※一部除外あり

4

それなら
安心だね♪



車椅子が届いたら CHECK! ポイント


1

車椅子が届いた～!!



2

横に傾けると
取り出しが
しやすいよ♪

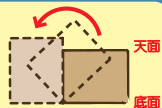

3


開けばすぐ
使えるよ★

※一部商品を除く



4


わからない場合は
弊社HPをご覧
ください。

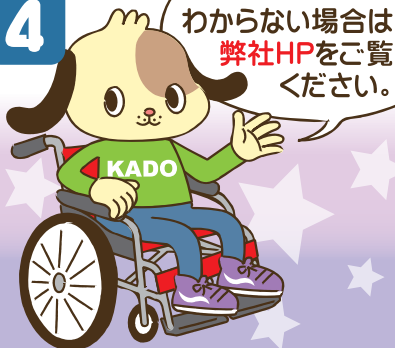

届いた車椅子が破損していたら

1

あれ？さっき届いたばかりの
車椅子壊れてる！！

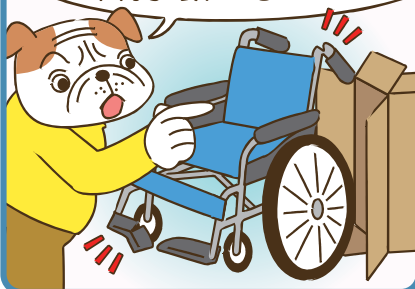

2


困ったなあ…
どうしよう…



3

そんな場合は、**運送会社に**
電話してみてね。

なるほど

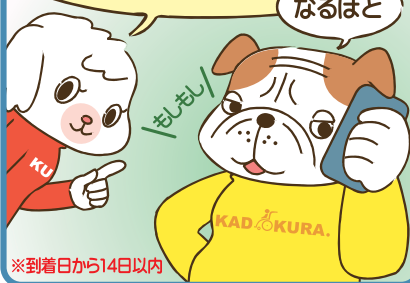

※到着日から14日以内

4

お願い
します！

運送保険が
付いておりますので
ご安心ください。



適格請求書発行サービス



1 適格請求書はメールにてお送りしています。



※紙の適格請求書は商品に同梱しておりません。

2 ご注文時の要望欄等でご依頼ください。

宛名・但し書も忘れずにね！



了解！



3 メールはいつ来るの？



出荷通知と
同じ日に
送ります♪



4 添付ファイルを印刷してご利用ください。



家族とよく話し合ってから買おう

1

あ、おじいちゃん。車椅子は届いた？ いらないって言ってたけど、ぜひ使ってみてよ！



もしも？ この間、本当に車椅子はいらないって伝えたはずじゃが…

2


自己満足で勝手に贈るのはやめて！



え～！ 喜ぶと思ってプレゼントしたのに…

3

届けてからいらないって言われても、配送ドライバーさんもこっちも迷惑なんだ！ 購入したキミもお金を損するだけだよ！

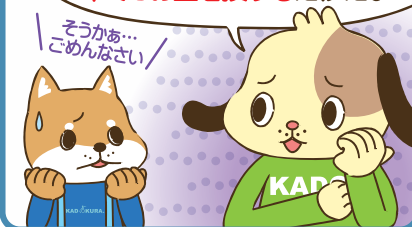

／ そうかあ…
／ ごめんなさい！

4

車椅子を贈る場合は、ご利用者の意思を尊重した上で、よく話し合ってから納得してから購入してね。



みんな
困るもんね…
気を付けるよ。

※返品には往復の送料、その他諸経費がかかります。

おっちょこちょいハムスター日記 その1

1

昨日届いたこの車椅子、僕にはサイズが大きいよ…小さいのと交換して欲しいなあ…



2

そちらで購入した車椅子、小さいサイズと交換して欲しいんですけど…ちよつと乗ってしまつて…



3

交換できないに決まってるじゃん!
当たり前のことだよ!



4

一度でも使用した車椅子は衛生面の理由※で、返品や交換はできないよ! サイズをよく確認してから購入してね。



※O-157・SARS・コロナウイルス等、感染防止の為

おっちょこちよいハムスター日記 その2

1

昨日届いたこの車椅子、僕には
サイズが大きいの…座面の高さ
とか調整できないかなあ…



2

購入した車椅子、乗ってみたら
身体に合わないの調整したい
んですけど…できないなら返品
したくて…



3

**調整できないに
決まってるじゃん!**

調整できる車椅子は
ほとんど無いよ!

ええ~!!



4

一度でも使用した車椅子は
衛生面の理由※で、返品や
交換はできないよ! サイズを
よく確認してから購入してね。




※O-157・SARS・コロナウイルス等、感染防止の為

屋外と屋内で使い分けよう



1

外で使ってる自走式の車椅子
家の中でも使いたいけど無理
かしら…うち狭いのよねえ…

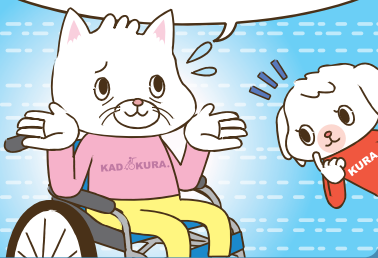

2

それなら屋内用にサイズの
小さい車椅子を購入して、
2台を使い分けてみたら??



3

全幅が小さくて、小回りの利く
簡易型が家の中では便利なの。
リハビリ用に足漕ぎができる
ネクストコーギーもおすすめよ!



4

わかったわ。それなら簡易型
を買って、家の中専用として
使ってみるわね。




全部は無理! 車椅子1台で



1

1台で、狭い家の中でも外でも快適に使えて、車にも楽に乗せられる車椅子欲しいなあ♪

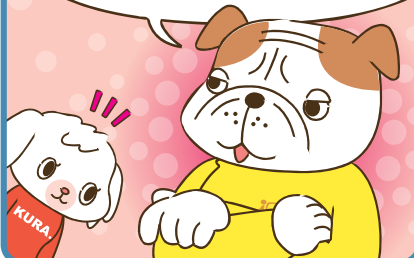

2

1台じゃ無理よ!

1台だけで、全ての場面に対応できる車椅子なんてないわよ!



3

全てのことを1台でやろうとしないで、それぞれの用途で車椅子は使い分けてね。



4


屋内用と屋外用で、最低2台は用意してね。屋内用は幅が小さい簡易型がおすすめよ。



全幅をよく確認して購入しよう


1

車椅子を室内で使いたいんだけど、家の廊下とか部屋のドアを通れるか心配だなあ。

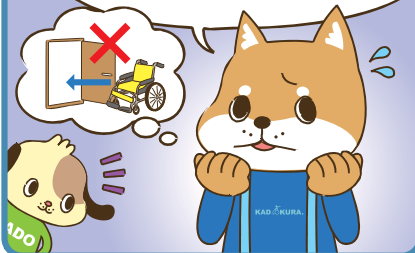


2

車椅子の全幅は一般的に**55cm**から**70cm**、それにハンドリムの操作等を考えると、**両側に5cm以上はスペースが必要だよ！**

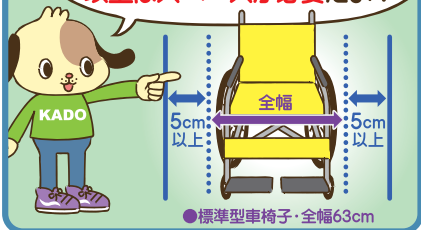

3

廊下に曲がり角がある場合は曲がる時もっとスペースが必要になるよ！**最低幅は1m無いと曲がるのが難しいかも。**

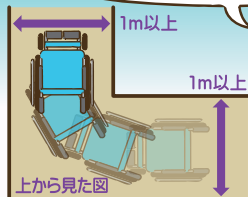

4

室内で車椅子を使う場合は、**事前に車椅子と家のサイズをよく調べたほうがいいよ！**



適した座面幅を選びましょう



1

買おうと思っている車椅子、
座面幅が狭そうだけど
ちゃんと座れるかしら？



2

最適な座面幅は
座ったお尻の幅 + 3~5cm
だよ。測ってみて！



3

反対に車椅子の座面幅が
かなり大きくても良いの？



4

座面幅が大きいとハンドリムに
手が届かなくなるよ！
それと家の各ドアの幅も
考えて車椅子を選んでね♪




サイズによる感じ方の違い



1

なんか最近、車椅子が
大きく感じるなあ…


痩せたの
かな

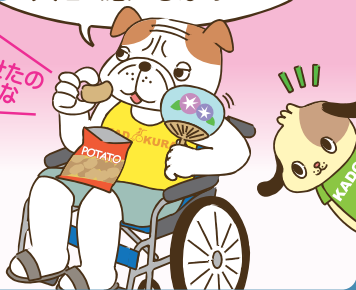

2

夏、薄着になると
今まで乗っていた車椅子が
大きく感じることもあるよ。

そうなの？

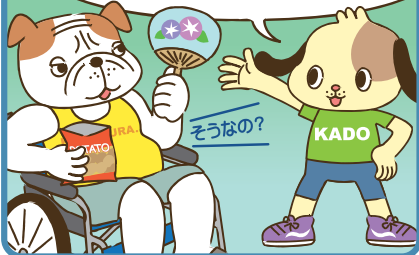

3


反対に、冬に厚着をして
車椅子に乗ると、狭く
感じるよ！



4

だから車椅子を買う時は
サイズを良く調べてから
買ったほうが良いよ。

OK♪

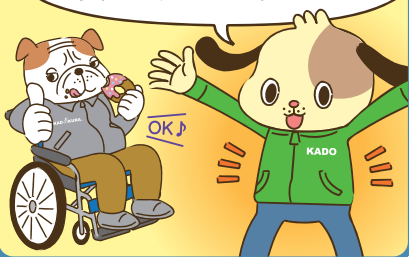


車のトランクに入る？




1

チャップスが欲しいけど、うちの車のトランクに入るか心配だわ。電話で聞いてみよう♪

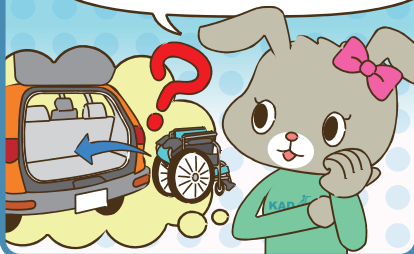

2

うちの車●▲★▼なんだけどトランクの中にチャップスってちゃんと入れられる？

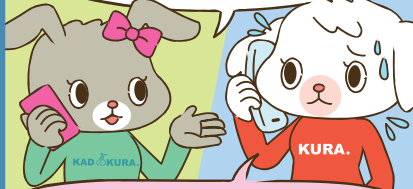

車名を言われても、うちは車屋さんじゃないからトランクのサイズは分からないの。

3

商品ページに車椅子の折り畳み時のサイズが書いてあるから、自分でトランクのサイズを測って調べてみてね。




4

分かったわ。トランクのサイズを測って、入るか調べてみるわね！



車椅子でタクシーを利用する時は


1 タクシーで移動したいけど…
普通のセダンタイプのタクシー
でも車椅子を載せられるの
かな??

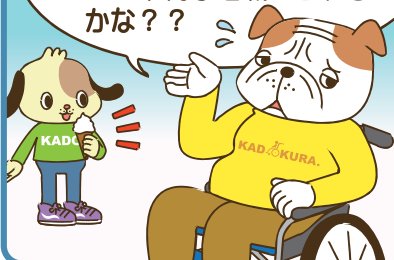

2 タクシーは**トランク内**に**LPG**
タンクがあるから、セダンタイプ
だと車椅子がトランクから
はみ出す場合があるよ。



3 ユニバーサルデザイン (UD)
タクシーやワゴンタイプの
利用がおススメだよ!

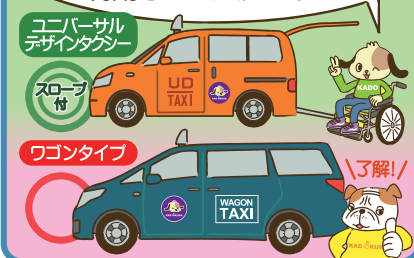

4 タクシーを呼ぶ時は、**車椅子で**
乗車する旨を必ず伝えよう!



シートベルトの着用について



1

おばあちゃんが突然立ったら
危ないから、シートベルトを
着けよう。



2

待って! 待って!!
シートベルトを介助者の
自己判断で着用させるのは
良くないよ!




3

身体拘束＝虐待にあたる場合
があるから、**医師の判断が**
なければシートベルトの着用は
おすすめしてないよ。



4

シートベルトは、**医師の判断の**
基、する・しないを決めましょう。

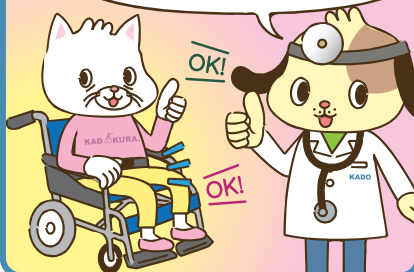

いる?いない?転倒防止バー

1

買おうと思っている車椅子、
転倒防止バーが付いてない
のか…倒れたら心配だなあ。
大丈夫かな??



2

下図のように、車軸がフレーム
の後方にある車椅子は、安定
していて後ろに倒れないから
転倒防止バーは必要ないよ!



3


逆にね、スポーツ車椅子など
重心が後方にあり、不安定な
車種だけに転倒防止バーが
付いているんだよ。



※例:スポーツ全般、リクライニング・ティルト式等

4

ほらね!だからカドクラの車椅子
は安全だから、ほとんど転倒
防止バーは付いてないんだ。

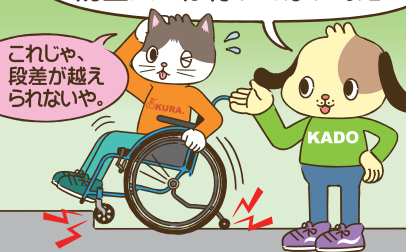


危険! 坂道・スロープ編



1

うわあ～！坂道に車椅子を止めてたら動き出しちゃったよ～！ちゃんと駐車ブレーキかけてたのに～

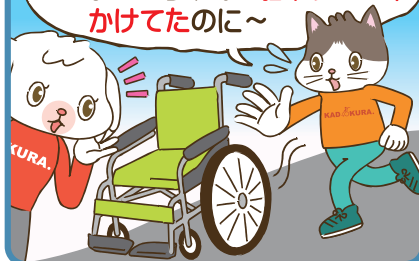


2

傾斜がある場所では、ブレーキをかけても動き出すことがあるの。絶対に坂の途中では駐車しないでね！




3

あと、下り坂で駐車ブレーキを制動用にするのも危険よ！車椅子は斜度4度以下の場所で使用してね。

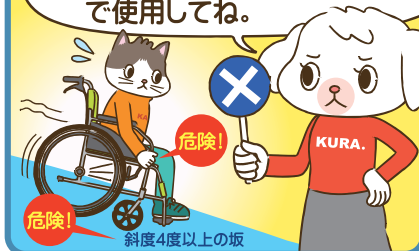

4

車椅子は必ず平らな所に駐車してね。やむを得ず傾斜がある場所に停める場合は、2輪以上に車輪止めを使うのよ。

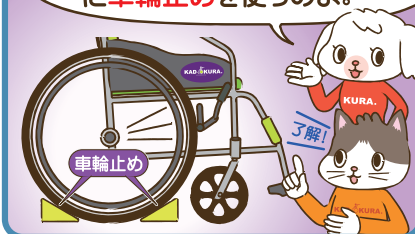

背折れ機能の取り扱い方法



1

あれ？おかしいなあ…
後輪が浮いちゃって
背折れがうまく
起こせないよ～！



2

背折れは下図のように
片方ずつ、両手を使って
起こしてください。



※車椅子本体が大変軽いので、両手で一気に
入れようとすると後輪が浮いてしまいます。


3

折り畳む時も、片方ずつ
背折れレバーを押してから
折り畳んでください。



4

これで背折れの取り扱い
はバッチリだね！

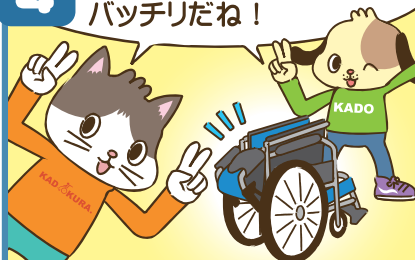


※「左右で固さが違う」「入りにくい」等は、クレームの
対象外となります。(利き腕・体力等、個人差がある為)

車椅子がまっすぐ進まない場合

1

あれれ？車椅子がなぜか
左に曲がっていきんだけど。
困ったなあ…

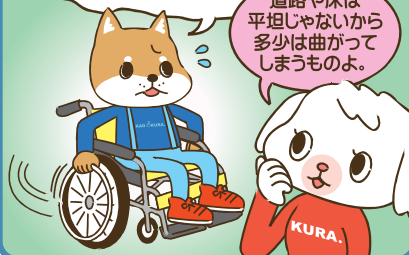


2

どうしても気になる場合は、
まず**前輪の車軸に髪の毛や
ホコリ等がからまっていないか
確認**してみてね。



3


動きが重い方の、前輪・後輪の
19ミリナットを1/10程度緩めて
軌道補正する方法もあるの♪

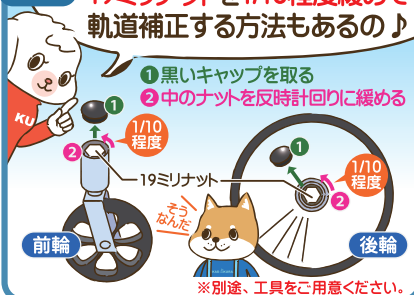

※別途、工具をご用意ください。

4

また**利き腕や、腕力・握力・腕の
長さ・身体の重心等の左右差
によって、まっすぐ漕いでる
つもりでも曲がってしまう場合
があるわ。**

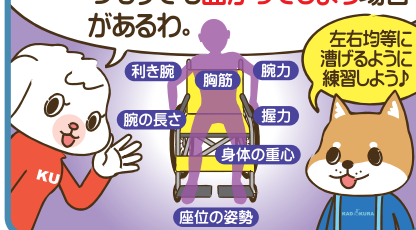


長くご愛用いただくために




1

今日届いたばかりの車椅子、
早速このまま乗って行くわ♪

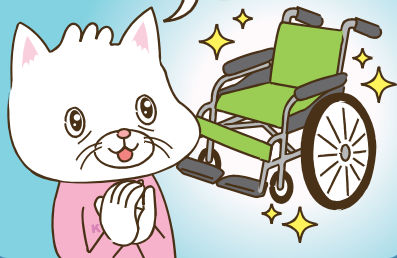

2

しばらく走行していると…

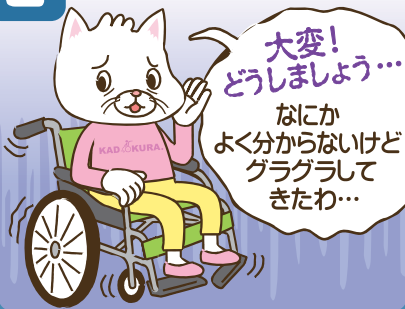

3

ピッピー！！

走行前点検を
しないと危険
だよ！



4

車椅子は自動車や
自転車同様、乗り物だよ。
毎回、乗る前にネジが
緩んでいないか点検
してね♪




修理の時はどうするの？



1


車椅子を修理したい場合は来てくれるのかしら？

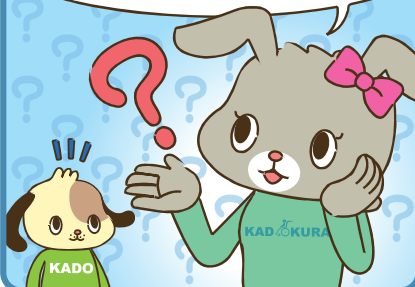

2

うちは**持込修理**なんだ。
遠方の場合は、宅配便で
送ってもらうことになるよ。

※送料実費

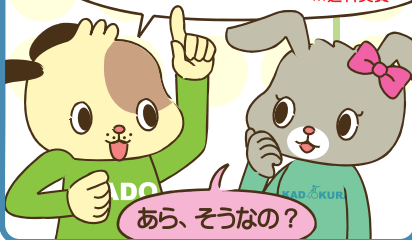

3

まずは**車椅子全体**や**修理
したい部分の画像**を撮って
カドクラまで送ってね。



※出張サービスは有料

4

パーツを**自分で交換**、または
近くの店で交換、**持込**の方法
があるよ！



ご注文からお届けまでの目安

1日

2日

7日前後

ご注意

- ◆平日12時までの決済完了確認で
当日出荷いたします。
- ◆交通事情や天候により、配送が
前後する場合がございます。

北海道



長崎	佐賀	福岡
	熊本	大分
		宮崎
		鹿児島

山口	島根	鳥取
	広島	岡山
	愛媛	香川
	高知	徳島

兵庫	京都	滋賀
大阪	奈良	三重
		和歌山

石川	富山	新潟	福島
		群馬	栃木
		長野	茨城
		埼玉	
		山梨	東京
		愛知	神奈川
		静岡	千葉

沖縄

離島



神奈川県から
日本全国に
お届けします!



カドクラ公式ショップ

アマゾン



楽天市場



Yahoo!
ショッピング



Yahoo!
オークション



メルカリ
Shops



<https://www.kadokura.org>

車椅子 カドクラ

Q 検索



LINE
公式アカウント

〈 LINE ID 〉 @kadokura
〈 アカウント名 〉 カドクラ車椅子



カドクラ.

株式会社 エーアンドエー

登録番号 T6020001062156

〒231-0027

横浜市中区扇町 1-1-16 DR204

TEL:045-681-5153