

# GB カート 取扱説明書

## ●開き方



①フットレストを下げます。



②背もたれを上げます。



③肘掛を下げます。



④ストッパーを掛けます。

## ●折りたたみ方



①ストッパーを解除します。



②肘掛を上げます。



③背もたれを前に倒します。



④フットレストを上げます。

## ●ブレーキのかけ方



ハンドルをカチッと音がするまで両手で握ります。

## ●ブレーキの解除



赤い丸レバーを引っ張ります。



※パーツ、本体の写真は実際の仕様と異なる場合がございます。

## 🔗 取付方法がご不明な場合は…

1. オフィシャル動画配信サイトにてご確認ください。YouTube <https://www.youtube.com/kadokurawheelchair>
2. LINE からも受け付けております。LINE (LINE ID) @kadokura
3. お近くの自転車屋さんにご相談ください。※お取扱不可のお店もございます。
4. 弊社認証工場にて持込修理を賜っております。※別途工賃がかかります。



**KADOKURA.**

株式会社 エーアンドエー  
〒231-0027  
横浜市中区扇町 1-1-16 DR204

TEL:045-681-5153  
FAX:045-681-5157

<https://www.kadokura.org>

## 注意事項

- 付属の工具のみでは取り付けできない場合があります。工具はお客様にて別途ご用意ください。
- いかなる理由でもパーツの返品・返金は賜れません。

⚠ 警告及び注意は公式ホームページでご確認ください。 <https://www.kadokura.org/wheelchair/warning.html>