

# 【スポーツ車いす共通説明書】 ※該当する箇所をご参照ください。



## ◆後輪タイヤの脱着◆

後輪タイヤ中央の PUSH ボタンを押しながらタイヤを抜き取るようにして外してください。タイヤを取り付ける際には PUSH ボタンを押しながら本体に差し込んで込んで下さい。入りにくいときは少しずつしながら入れてみて下さい。差し込んだ後、タイヤが正しく挿入されているか確認してください。



## ◆足置きの高さ調整◆

フットレストを止めております六角ナットを緩めると足置きを上下にスライドすることが可能です。お好みの高さ調整し、最後に六角ネジを締めてください。※車種により若干方法・カタチが異なります。



## ◆転倒防止バーの調整◆


転倒防止バーの高さは調整が可能です。固定レバーを解除し、適切な高さ（お好みの高さ）に調整してください。（車種により調整出来ないモデルもあります）



## ◆介助ハンドルの調整◆

対象：K(ケイ)

固定レバーを解除すると介助ハンドルが上下に動かせます。約4cmの上下調整が可能です。

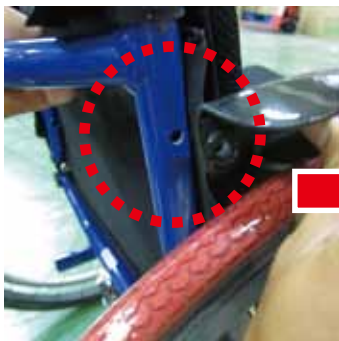

## ◆サイドガードの取り付け◆

対象：アテネ

サイドガードを付属のネジ・スペーサーを利用して左右対称になりますようにフレームに取り付けてください。※梱包上取り外された状態になっております。

### ※ご注意

ボルト・ナットの増し締め、タイヤの空気圧のチェック、フレームのヒビ割れ等は使用前に必ず行ってください。スポーツ車椅子のパーツは基本工場からの取り寄せとなりますので納期に2～3か月かかる場合がございます。納期の催促はご容赦くださいますようお願い申し上げます。フレームの塗装落ちや使用上問題のないキズ等はクレームの対象外とさせていただきます。空気入れは米国式バルブのものを请使用ください。また、車いす使用時におけますケガ・転倒・事故等の責任は当方では一切責任を負いかねますので使用の際には十分にご注意下さいませ。