



スムーバ C701-A
組立マニュアル

KAD.  **KURA.**

組立マニュアル



フルリクライニング車椅子 スムーバー C701-A

※共通取扱説明書も必ずお読みください。



- 部品構成
①フレーム
②背面シート
③座面シート
④フットレスト
⑤各種サポート



ヘッドレスト取付方法



①フレームを広げる



②背面補強バーを取り付ける



③ヘッドレストバーを取り付ける。(上げぎみに)



④ヘッドレスト本体を取り付ける。



⑤ヘッドレストの角度調整はノブを回してください。左回りで緩み、右回りで締め付けになります。



背面ベース取付方法

KADOKURA

表



※安全ベルトは拘束にあたる為、使用は医師の判断に従うこと。

- ①背面ベースを取り付ける。
※安全ベルトを上下左右に取り付ける。

裏



- ②背面ベースには上下があります。ポケットを下側にした状態で設置します。



- ③背面ベース4箇所をフレームにクリップでハメこむ。



- ④背面ベースの固定ネジを一度外してください。




- ⑤背面ベースをU字のクランプでフレームに取り付ける※左右取付



- ⑥上半身サポート用の取付ボルトを外す。

※付属の工具で六角を外す

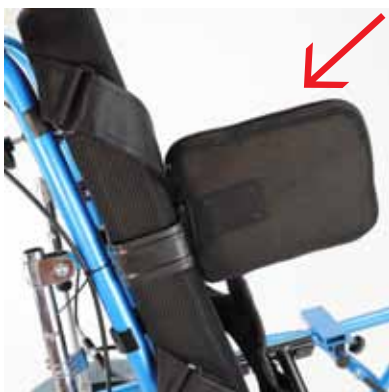

- ⑦上半身サポートを背面ベースとフレームの間に差し込む



- ⑧先ほど外した取付ボルトを元のネジ穴に戻しサポートをお好みの位置に調整してください。※三段階で位置を選べます。



4ミリ六角レンチ
5ミリ六角レンチ
10ミリスパナ

表



裏



①座面ベースを取り付ける。※シーベルトを取り付ける。

②座面ベースを取り付ける。

③座面ベース4箇所をフレームにクリップでハメこむ。



④座面ベースの固定ネジを一度外してください。



⑤向きを確認しながらアームサポートを差し込む。ネジで締め付ける。



⑥アームサポート用のブラケットをフレームに差し込む。



⑦座面ベース底面のネジを適当な位置で締めこむ。



⑧向きを確認しながらアームサポートを差し込む。ネジで締め付ける。



⑨最後は実際に座って最適な位置に各種サポートを調節しましょう。

股間サポート取付方法

KADOKURA.



①股間サポートを取り付ける。



②座面ベース前方底面に差し込む。ネジで締め付ける。



③股間サポートを適切な位置に調整しましょう。

転倒防止バー調整方法



①転倒防止バーを引き出す



②ストッパー金具を引き上げて転倒防止バーを地面ギリギリで調節。



③転倒防止バーは出しすぎると段差を超える事が出来なくなる場合があります。

KADOKURA.

フットレスト調整方法




①レバーを倒しながら持ち上げる



②フットレストは足を保持する為、レバーは固く設定されています。



③9段階で設定が可能。最大でフットレストを水平にすることが可能です。ふくらはぎパッドは3段階で調整可能

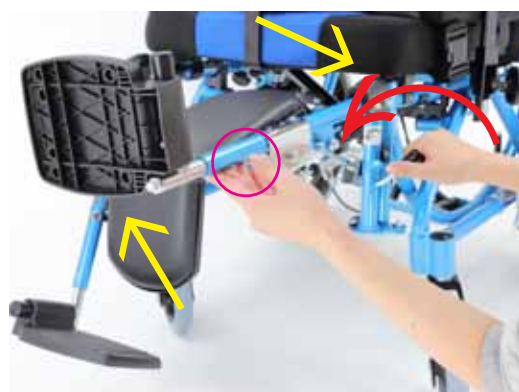

④フットレストを元の位置に戻すときも同様、レバーを倒してください。フットレストを軽く持ち上げるとスムーズに戻ります。

※付属の工具でフットレストを伸ばす事も可能です。詳しくは共通説明書をお読みください。

ヘッドレスト調整方法



①ヘッドレスト最大



②ヘッドレスト最小

リクライニング操作

KADOKURA

※仕様変更により、ラベルもしくはレバー作動条件が反転する場合があります。



左レバー リクライニング



通常時



右レバー ティルト



左レバーを握りながらゆっくり倒す。最大で約 180 度になります。



右レバーを握りながらゆっくり倒す。最大で約 45 度傾斜します。



リクライニングさせた状態で移動する場合は作動ケーブルを地面に引きずらないように注意すること。

※ケーブル破損はクレームの対象外



利用者が無理のない姿勢で理想の座位を決めてください。

注意！倒しすぎは転倒の原因となり、大変危険です。窒息、骨折、ケガ、死亡の可能性あります。